
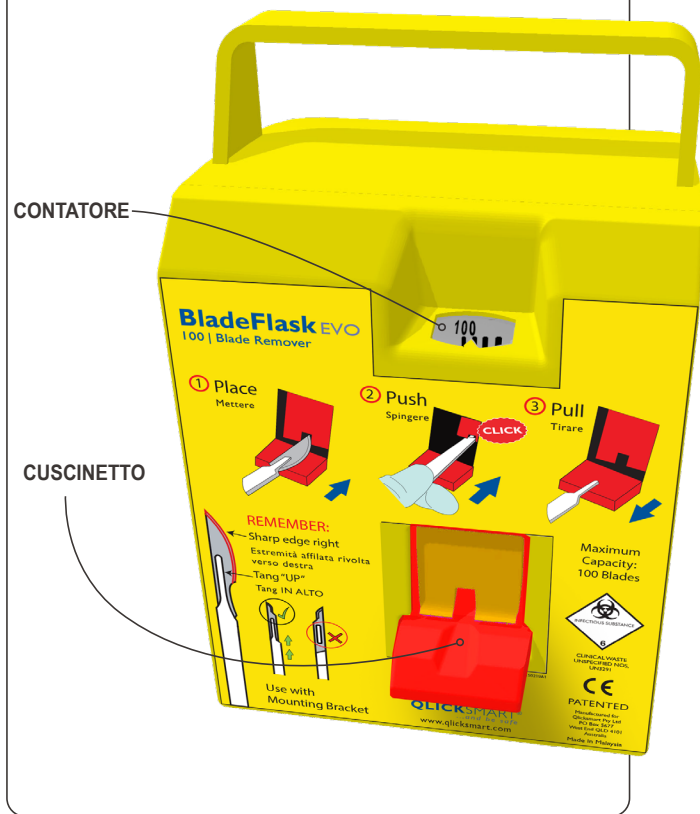



Istruzioni per l'uso

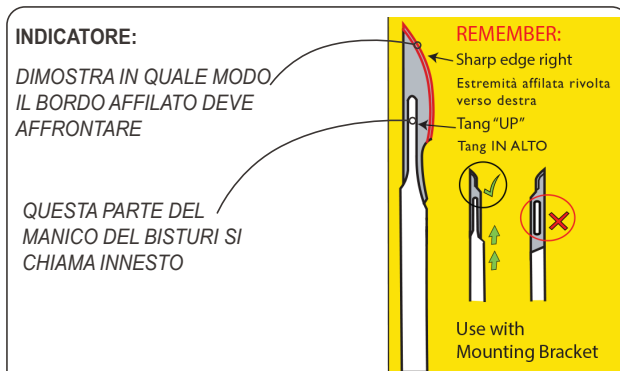


MONTARE AL MURO O AL CARRELLO

- Se il BladeFlask EVO non è stato montato prima, preparare la staffa di montaggio universale*.

A IL SUPPORTO HA IL NASTRO BIADESIVO SUL FONDO

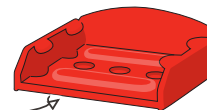

B O CON L'USO DI VITI

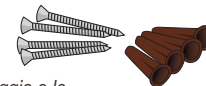

* Vedere il modello di montaggio e le istruzioni all'interno della confezione della staffa

- BladeFlask EVO può essere montato al muro o al carrello o al banco.

SCORRERE VERSO IL BASSO DEL SUPPORTO




DA NOTARE: BladeFlask EVO deve essere montato alla Staffa di Montaggio durante l'uso


SCORRERE INDIETRO DELLA STAFFA

RIMUOVERE LA LAMA AZIONE CON UNA SOLA MANO:


- Posizionare la lama sul cuscinetto con il bordo affilato rivolto a destra (o il 'innesto' in alto).

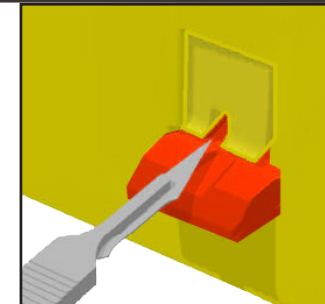

- Spingere il manico del bisturi nel BladeFlask EVO nella BladeFlask EVO lungo la rampa fino a sentir il clic

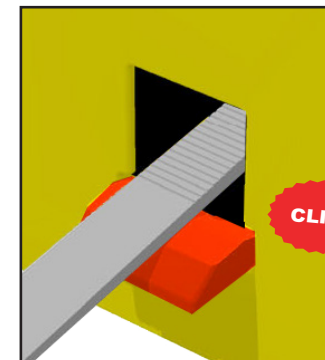

- Rimuovere il manico

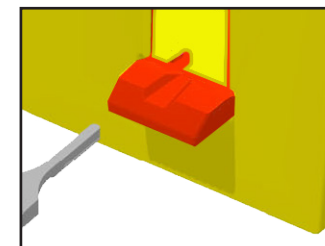

DA NOTARE: BladeFlask EVO viene smaltito come rifiuto sanitario dopo che il contatore si spegne automaticamente appena raggiunge la piena capacità.

