



VALMISTELE KAHDELLA KÄDELLÄ:

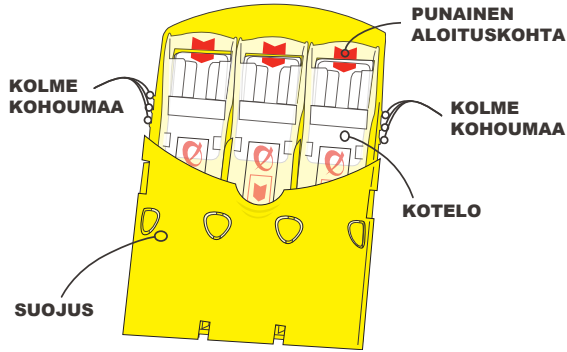


1. Avaa suojus painamalla BladeCASSETTE-kotelon sivuilla olevia kohoumia.

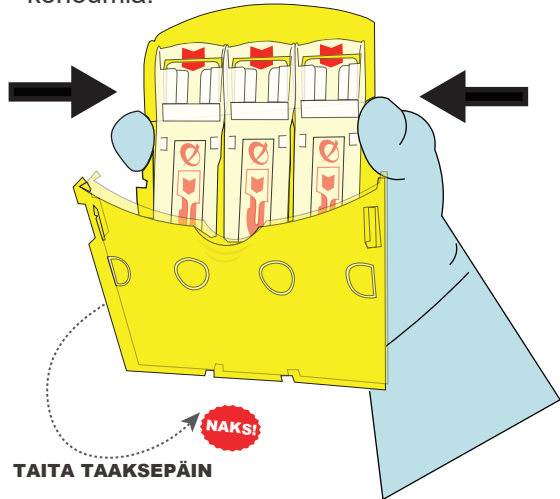


2. Taita suojusta taaksepäin, kunnes se naksahtaa ja lukittuu paikalleen, ja aseta BladeCASSETTE liinalle.

KÄYTÄ YHDELLÄ KÄDELLÄ:

3. Liu'uta skalpellin terän kärki koteloon yhdellä kädellä.

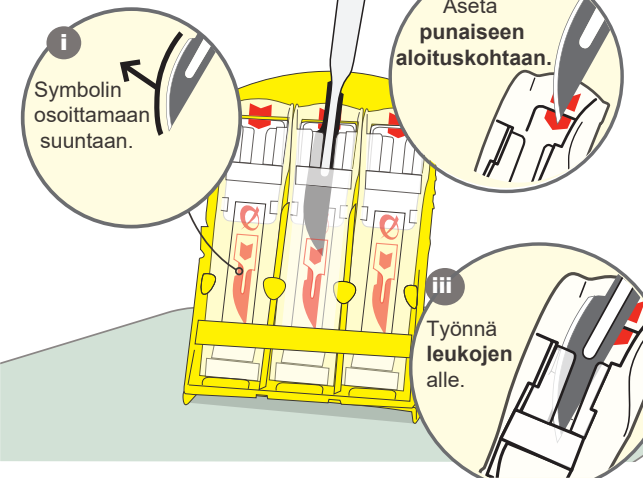


4. KALLISTA BladeCASSETTE 90°:seen ASTI, työnnä *sen jälkeen* vartta alaspäin, kunnes kuulet naksahduksen.

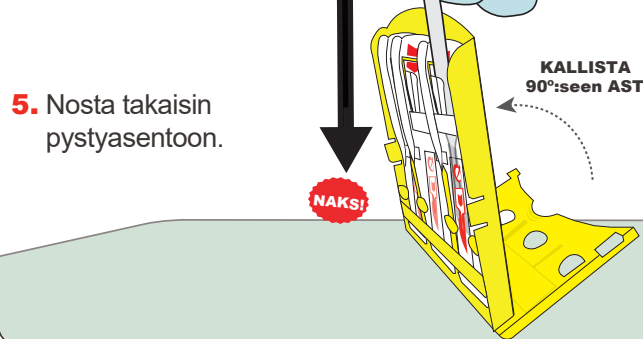

5. Nosta takaisin pystyasentoon.

TURVALLISTA KÄYTTÄÄ MOLEMPIA KÄSIÄ:

6. Tue BladeCASSETTE-koteloa toisella kädellä ja vedä skalpellin varsi irti.

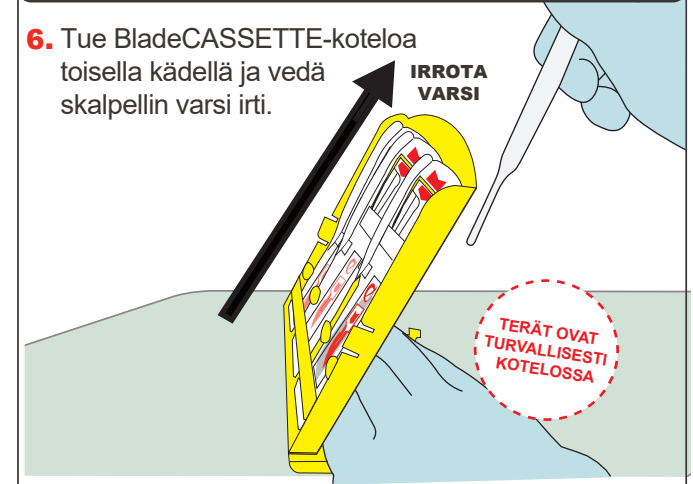

7. Toista toimenpide tarvittaessa, kunnes kotelo on täynnä.
8. Sulje taittamalla suojus takaisin paikoilleen.
9. Skalpellin terät on nyt helppo laskea, ja BladeCASSETTE on valmis särmäisjäteastiaan.

